

Kurzanleitung zur Abnahme von STD-Abstrichen mit eSwap

1. Röhrchen kennzeichnen

- Patientennamen und Entnahmestelle deutlich auf dem Röhrchen vermerken.

2. Passendes Abnahmebesteck wählen

- **Rot:** für Oral-, Vaginal-, Genital- und Analabstriche
- **Orange:** für Urethralabstriche

3. Abstrich durchführen

- Entnahmestelle mit dem Tupfer kräftig abstreichen.
- Bei Urethralabstrichen den Tupfer vorsichtig in die Harnröhre einführen.

4. Tupfer verarbeiten

- Tupfer in das Transportröhrchen überführen.
- Stiel an der Perforation abbrechen.
- Röhrchen fest verschließen.

5. Dokumentation beilegen

- Pro Abstrich ein vollständig ausgefülltes Antragsformular
- Zusätzlich ein Labor-Überweisungsschein

6. Versand vorbereiten

- Probenmaterial zusammen mit Formularen in Versandtüte geben.
- Versandtüte sicher verschließen und umgehend versenden.